

Test detección Coronavirus (COVID-19) INSTRUCCIONES

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL TEST:

- **Dos escobillones** recolectores (fotografía 1)
- **Etiquetas** (fotografía 2)
- **Dos bolsas** de plástico transparente (fotografía 3)
- **Sobre naranja** para muestra especiales (fotografía 4)
- **Documentación:** Peticionario y Consentimiento Informado de Protección de Datos (fotografía 5 y 6)



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6

Tipo de muestra:

Test detección Coronavirus (COVID-19) requiere de dos muestras (faríngea y nasal). El kit contiene **dos dispositivos** (cepillos recolectores) para la obtención de las dos muestras de forma sencilla. Para ello, ten en cuenta las **Consideraciones Previas** así como las **Instrucciones** que se detallan más adelante.

Documentación necesaria:

Para realizar la prueba es necesario cumplimentar los siguientes documentos y adjuntarlos en el kit:

- Peticionario de Análisis
- Consentimiento Informado de Protección de Datos

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:


Para asegurar un buen análisis, es fundamental que a la hora de tomar las muestras sigas las indicaciones que se presentan a continuación:

1 | Consideraciones previas:

- Durante los **30 minutos previos a la toma de la muestra** el paciente no debe comer, beber, fumar ni mascar chicle.
- Una vez realizada la toma de la muestra **conservarla congelada hasta que el kit se devuelva a cualquiera de los centros SYNLAB homologados.**
- **Recuerda que** la muestra debe llegar al laboratorio en un plazo **máximo de 24h** desde su realización.




2 | Instrucciones para la toma de muestra:

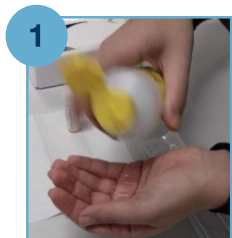


1 Desinfecta tus manos con alcohol o ponte los guantes.




2 Toma uno de los escobillones e identifica el tubo con una de las etiquetas.

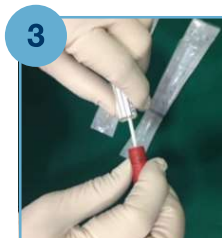


3 Saca el escobillón unos centímetros.

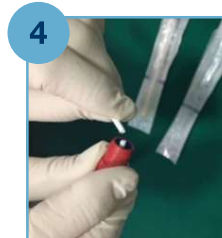

4 Parte la varilla cerca del tapón, aproximadamente 1 cm y descártalo.

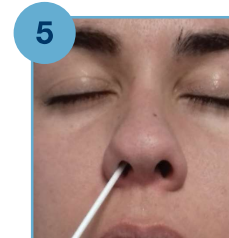

5 Introduce suavemente el escobillón de forma lenta y profunda por uno de los orificios nasales. Deja que se empape durante 10-15 segundos.

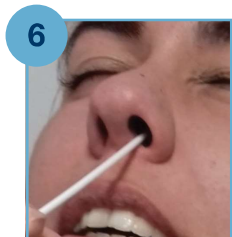


6 Introduce el mismo escobillón recolector por el otro orificio nasal y repite la toma. Recuerde que para que la toma sea apta debes introducir el escobillón lo más profundo posible.



7 Introduce el escobillón en el contenedor etiquetado sin cerrarlo.



8 Toma el segundo contenedor y extrae el segundo escobillón.

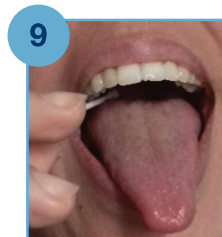

9 Introduce el segundo escobillón en la profundidad de la boca hasta llegar a la parte más posterior de la faringe, frota suavemente al menos 10 veces.



10 Introduce el escobillón en el contenedor etiquetado que ya contiene la muestra nasal y ciérralo.



11 Introduce en una bolsa de plástico transparente el tubo etiquetado con los escobillones.



12 Introduce el petitorio cumplimentado y etiquetado en una bolsa de plástico transparente.



13 Introduce las dos bolsas de plástico dentro de la bolsa naranja junto con las etiquetas sobrantes y conserva las muestras congeladas.



14 Trae el kit al centro SYNLAB homologado más cercano

CONSULTA DE RESULTADOS:

Los resultados de tu test de detección Coronavirus estarán **disponibles en un plazo de 24h** una vez se hayan entregado las muestras en el laboratorio. **Podrás consultar tus resultados por internet siguiendo los siguientes pasos:**

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

- 1 Entra en nuestra página web: <https://misinformes.synlab.es>
- 2 Regístrate para crear tu cuenta
- 3 Accede a tu cuenta introduciendo tu **e-mail** y **contraseña**, si te conectas por primera vez deberás introducir el **Número de muestra**
- 4 Consulta, descarga y/o imprime todos tus informes

Número de muestra

